



KRYOSHAPE



L'anti-cellulite 4D
de dernière
génération

**Amincissement
par cavitation et lipolaser**


Anti-cellulite par palper-rouler

**Raffermisssement cutané
par radiofréquence**

CAVITATION 4C

La cavitation utilise une onde ultrasonique pour attaquer mécaniquement la membrane de la cellule adipeuse.

L'onde ultrasonique crée une vibration à l'intérieur de la couche adipeuse. Les cellules adipeuses n'ont pas la capacité structurelle de résister à cette vibration et leur membrane cèdera très rapidement.

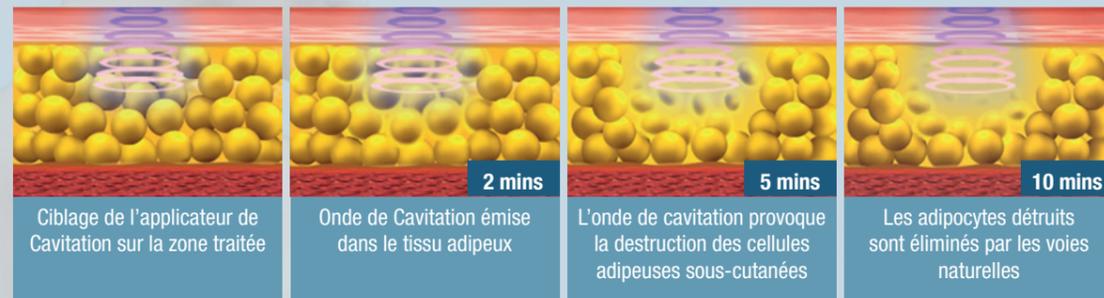

- * Quatre transducteurs intégrés dans un seul applicateur
- * Les transducteurs fonctionnent simultanément
- * Chaque diamètre est équivalent à 4,3 cm, couvrant une surface totale de 58 cm²
- * Puissance de Cavitation de 120 à 200 W avec une intensité de 2 à 3,5 W/ cm²
- * Technologie de centrage automatique de la fréquence de cavitation
- * Destruction de la graisse réfractaire par zones larges
- * Résultats visibles en 30 minutes de traitement



FONCTIONNEMENT DU VOLANT KRYOSHAPE

KRYOSHAPE utilise la fréquence radio bipolaire et l'énergie lipolaser avec aspiration par vacuum associé au palper-rouler.

Utilisation Synergique des Énergies en V-SHAPE

- Le lipo laser de 650Nm chauffe la peau et les tissus adipeux jusqu'à 13 mm de profondeur.
- La fréquence radio bipolaire (RF) chauffe la peau et les tissus adipeux de 5 à 15 mm de profondeur.
- La technique vacuum assure la précision de la distribution des énergies.
- Le palper-rouler active le drainage lymphatique et lutte contre la cellulite.



Applicateur M Shape
S'utilise pour les plus petites zones : poignées d'amour, mollets, bras, et pour renforcer les résultats de l'applicateur L Shape.



Applicateur L Shape
S'utilise pour les zones larges : cuisses, fesses, ventre ou dos.

- Roll in** – mécanise la cellulite et les tissus adipeux réfractaires.
- Roll out** – stimulation spécifique et contrôlée de la peau détendue et de la cellulite.
- Roll up/down** – redessine les contours de la silhouette.

Applicateur visage

Redessine l'ovale du visage, affine le double menton, tonifie le décolleté et lutte contre les rides.



TECHNIQUE NON-INVASIVE VISAGE ET CORPS

Nom	Description technique
ECRAN	Ecran couleur 16 pouces
ECRAN APPLICATEUR	Ecran couleur 4,3 pouces
PRESSION VACUUM (LARGE)	200-780 mmHg
PRESSION VACUUM (M - S)	90-440 mmHg
FRÉQUENCE RF	5 MHz
LONGUEUR D'ONDE LIPO LASER	650 Nm
PUISSANCE LIPO LASER	10 W
PUISSANCE RF	120 W
MODE VACUUM	1 continu et/ou 3 alternatives
SENS DES ROULEAUX	Roll in & Roll out & Roll up & Roll down
FRÉQUENCE DE CAVITATION	40 KHz
TRANSDUCTEURS DE CAVITATION	Applicateur de 4 pièces
SURFACE TRAITÉE PAR CAVITATION	58 cm ²
PUISSANCE DE CAVITATION	120 - 200 W

